


# ETAPES POUR UN BON PRELEVEMENT

## PORC

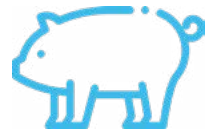

### SAS SANITAIRE



1  
Se laver et se désinfecter  
les mains



2  
Mettre les surbottes  
à l'entrée du bâtiment



3  
Ouvrir le sachet zippé sans toucher  
l'intérieur avec les doigts

### BATIMENT



4  
Mettre les gants bleus



5  
Mettre les pédichiffonnettes  
sur les surbottes et **marcher** en  
couvrant la surface d'élevage



6  
Frotter la chiffonnette à la main sur les  
lieux d'accumulation afin de récupérer un  
**MAXIMUM de déjections et de poussières**  
(Abreuvoirs/nourrisseurs/descentes d'aliments/poussière des  
cloisons/murs/chariots d'aliments/matières fécales récoltées)

### CONDITIONNEMENT



7  
Remettre les prélèvements ré-  
alisés dans le sachet d'origine,  
enrouler plusieurs fois le haut du  
sachet puis fermer à l'aide de la  
bande métallique



8  
Remettre le tout dans le  
sachet zippé fourni dans le kit

**ATTENTION**  
Ne pas souiller l'extérieur du  
sachet avec le prélèvement



9  
Vérifier que la date de prélèvement  
est indiquée sur le sachet et le mettre  
dans l'enveloppe de retour. Envoyer  
les prélèvements **immédiatement**  
(possibilité de conserver au réfrigérateur  
pendant 24h)

\* **Envoyer les prélèvements au laboratoire dans les 24 heures** suivant leur collecte ou les réfrigérer (le délai entre le prélèvement et l'analyse ne doit pas dépasser 4 jours). Les prélèvements doivent être postés de préférence avant le mercredi soir.

### LE MATERIEL NECESSAIRE

#### KIT SANDWICH



Ce kit contient une paire de **pédi-  
chiffonnettes**, une **chiffonnette**  
et une paire de **gants bleus**



**CONTACTER RESALAB**

22 rue Olivier de Serres  
ZAC de la Buzenière - BP539  
85505 LES HERBIERS cedex

Tél. : 02 51 91 29 05 - [www.resalab.fr](http://www.resalab.fr)